


Accu-Chek® Instant cihazınızı mySugr ile senkronize etmek için bağlantı adımlarını izleyin

- 1 Akıllı telefonunuzdaki Bluetooth özelliğini açın. Eğer ihtiyacınız olursa akıllı telefonunuzun kullanma kılavuzuna bakabilirsiniz.
- 2 mySugr uygulamasında alt menüde yer alan "Bağlantılar" bölümüne tıklayın.



- 3 "Accu-Chek® Instant"ı cihazınızı seçin ve "Şimdi bağlan" butonuna tıklayın.

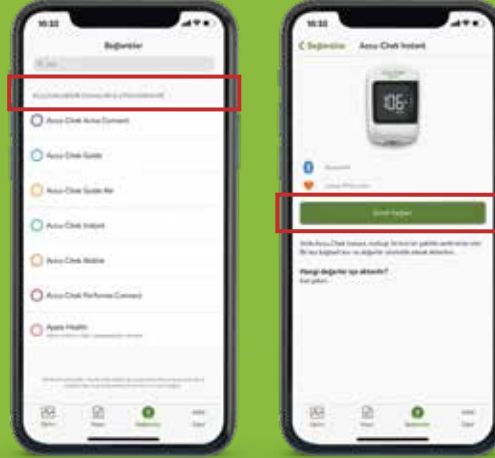

- 4 Ölçüm cihazınızı kapatın.
- 5 Ölçüm cihazınızın butonuna 5 saniye basılı tutun.

- 6 İstendiğinde ölçüm cihazınızın arkasında bulunan PIN numarasını girin.



- 7 Eşleştirme başarılı olduğunda cihazınızın ekranında "OK" yazısını göreceksiniz.





Diyabetinizi CepTe Bilin!



mySugr uygulamasını hemen indirin!



ACCU-CHEK® VE ACCU-CHEK® INSTANT Roche'a ait ticari markalardır.
Diğer tüm ürün isimleri ve ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

Danışma Hattı
0800 211 36 36
0850 211 36 36

accu-chek.com.tr

facebook.com/accuchecktr

instagram/accuchecktr

youtube.com/@accuchecktr

Accu-Chek® Instant ile **mySugr Pro**
versiyonu **ÜCRETSİZ!**

MC-TE-01684

DIYABETİNİZİ CEPTE BİLİN!



Accu-Chek® Instant ile **mySugr** uygulamasına
bağlanın, diyabet yönetimini kolaylaştırın.

